

Anleitung BVDV-Ohrmarkenset

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Gewebeprobeohrmarke immer zuerst eingezogen wird und danach als zweite Ohrmarke die normale Ohrmarke ohne Gewebeentnahme!!!

1. Vorbereitung der Gewebeprobeohrmarke

1 Probenbehälter

2 Dornteil

3 Lochteil




Sie benötigen das Dornteil mit weißem Zylinder **2** und das Lochteil mit weißer Kappe **3**.

1



2

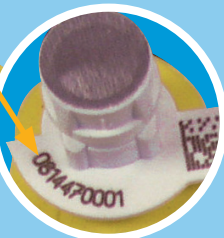

3



Halten Sie den Probebehälter **1** bereit. Kontrollieren Sie, ob die Nummer des Probebehälters mit der Ohrmarkennummer und der Nummer auf dem weißen Zylinder des Dornteils **2** übereinstimmt.

BVDV-Gewebeprobe entnehmen und amtliche Rinderohrmarke einziehen – Zwei auf einen Streich –


Bitte beachten Sie bei der Entnahme der Gewebeprobe folgende Empfehlungen:

2. Platzierung der Gewebeprobeohrmarke in der Zange

a) Platzierung des Dornteils (weißer Zylinder).



Den seitlich angebrachten Riegel drücken. Den weißen Zylinder in die Öffnung schieben.

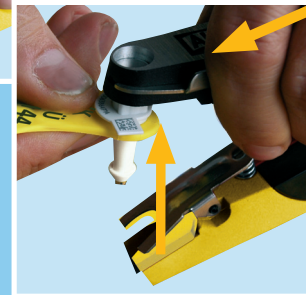


b) Platzierung des Lochteils (weiße Kappe). Gefederte Halterung drücken und das Lochteil einschieben. **Den grünen Kunststoffverschluss im Lochteil auf keinen Fall entfernen!**




3. Einziehen der Gewebeprobeohrmarke

a) Korrekte Position der Ohrmarke

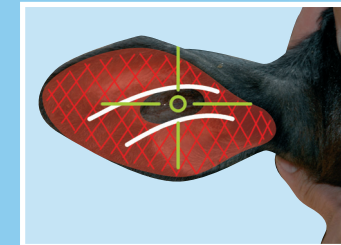

Die Ohrmarke sollte mittig zwischen den beiden Ohrknorpeln platziert werden. Es ist darauf zu achten, dass die Ohrmarke nicht zu weit außen und nicht zu nah am Kopf eingezogen wird.

b) Fixierung des Kalbes

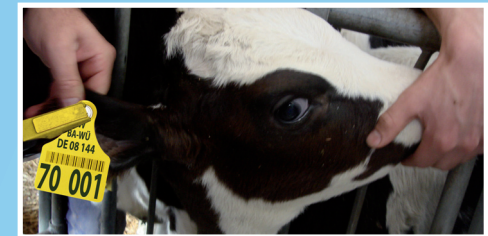

Kalb bitte unbedingt fixieren!

c) Einziehen der Ohrmarke



Lochteil in der Ohrinnenseite platzieren. Zange zügig und fest zusammendrücken. Anschließend verbleibt die Metallstanze in der Zange.

4. Gewebeprobe verschließen

a) Zange mit Metallstanze und Probe nach der Entnahme

Inhalt der Metallstanze :



- grün oder weiß :


Probe erfolgreich entnommen

- rosa : Probe leer !

b) Deckel des Probenbehälters öffnen



c) Probenbehälter auf die Stanze setzen und die Zange schließen

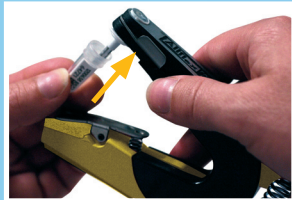

d) Zange zudrücken und Probenbehälter fest schließen (man hört ein Knacken)



e) Den seitlich angebrachten Riegel drücken, Probe lösen. Deckel hängen lassen!





f) Fertig verschlossener Probenbehälter



5. Vorbereitung der zweiten Ohrmarke (normale Ohrmarke)



Für das Einziehen der zweiten (normalen) Ohrmarke die bisher gebräuchliche rote oder blaue Allflexzange verwenden, oder bei der gelben Gewebeohrmarkenzange den mitgelieferten Zangendorn wie folgt einsetzen: Zangendorn aus der Innenseite des Zangenschenkels lösen. Seitlich angebrachten Riegel drücken und Zangendorn in die Öffnung schieben.

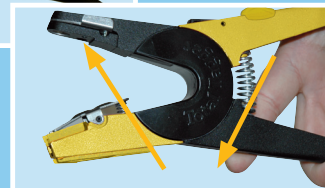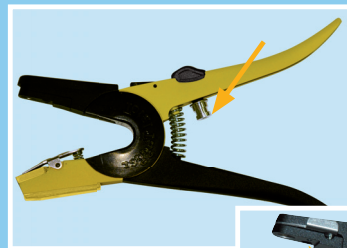

6. Versand der Probe ans Labor

Bitte geben Sie den ausgefüllten Antrag gemeinsam mit der dazugehörigen Probe in den durchsichtigen Kunststoffbeutel. Diesen bitte korrekt verschließen und in den mitgelieferten weißen Kunststoffumschlag verpacken und zur Untersuchung direkt an das STUA Aulendorf - Diagnostikzentrum senden.



Kontaktadressen :

LKV Baden-Württemberg
Heinrich-Baumann-Str. 1-3
70190 Stuttgart

Fax : 0711/92547-310

Mail : tierkennzeichnung@lkvbw.de

www.lkvbw.de



STUA Aulendorf-Diagnostikzentrum
Löwenbreitestr. 18/20
88326 Aulendorf

www.stua-aulendorf.de



Rindergesundheitsdienste der TSK BW
www.tsk-bw.de

Die zuständigen Veterinärämter

