


Anleitung für die Eingabe von Boli bei Schafen und Ziegen

ALPHA LINE

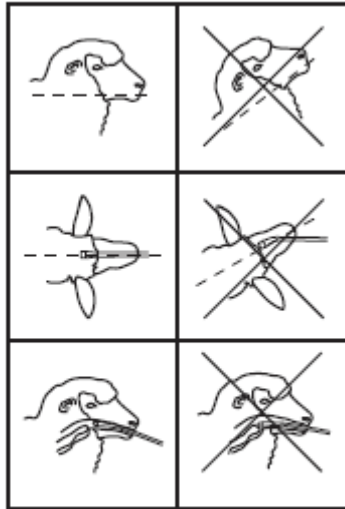

ACHTUNG: Das Setzen eines Bolus muss durch eine sachkundige Person (praktizierende/r Tierärztin/ Tierarzt) erfolgen, da es bei zu früher (z.B. junge Tiere) oder unsachgemäßer Applikation zu Verletzungen und schlimmstenfalls in der Folge auch zu Tierverlusten kommen kann.

Eine passende Schlundsonde (Applikator) für die Boli muss verwendet werden.

- 1) Isolieren Sie das Tier von der Herde und beruhigen Sie es. Legen Sie einen Bolus in den Applikator ein.
- 2) Den Applikator vorsichtig in das Maul des Tieres bis zur Zungenbasis einführen.
- 3) Den Bolus vorsichtig an der Zungenbasis absetzen und den Applikator zurückziehen.
- 4) Das Maul des Tieres sollte nach dem Einlegen des Bolus noch eine Weile geschlossen gehalten werden.

VORSICHT

Der Applikator sollte nie die Speiseröhre erreichen.

Der Kopf des Tieres muss immer horizontal gehalten werden, so wird der Bolus einfacher geschluckt.

Der Bolus soll immer auf natürliche Weise geschluckt werden.

DATAMARS

Corporate Headquarters:

Via ai Prati
6930 Bedano-Lugano
Switzerland
Phone: +41 91 935 73 80
Fax: +41 91 945 03 30

livestock-id@datamars.com

www.datamars.com